

DERMATOPHYTE PROFESSIONAL TEST STRIP

UNDERSØG DINE KUNDER FOR TINEA UNGUIUM PÅ DIN EGEN KLINIK.



INGEN DYRE KURSER NØDVENDIGE



KUN 10 MINUTTER



SPARER PENGE VED ENHVER TEST



FORLIGELIG MED ANTISVAMP-MEDICIN

ER DU INTERESSERET? TØV IKKE MED AT KONTAKTE OS.

WWW.HFLLABORATORIES.COM | WWW.FUNGICHECK.COM

HFL LABORATORIES BV | DE HOOGT 59 | 5175 AX LOON OP ZAND | NL
T. +31 (0)13 4551749 | INFO@HFLLABORATORIES.COM

DEN REVOLUTIONÆRE NYHED

Dermatophyte Test Strip

FungiCheck Tinea Unguim



DERMATOPHYTE PROFESSIONAL TEST STRIP

UNDERSØG DINE KUNDER FOR TINEA UNGUIUM PÅ DIN EGEN KLINIK.

HFL LABORATORIES | ESTABLISHED IN THE NETHERLANDS SINCE 2005

DEN REVOLUTIONÆRE NYHED

FungiCheck er et immunkromatografisk kit til professionelle til påvisning af dermatofytter i en negleprøve.

Dermatofytter er svampe, der har brug for keratin for at kunne vokse. Disse svampe kan bevirke infektioner af huden, håret og neglene. Fordi dermatofytter har brug for keratin til at vokse, er de begrænset til hår, negle og det øverste hudlag. Dermatofytose betegnes som "tinea"-infektioner.

FungiCheck-testtrimmen kan kun påvise tilstedeværelsen af tinea unguium (neglesvamp) i neglene. (Med undtagelse af candida og gær)


Eksempler på former for tinea unguium:

- Lateral neglesvamp. En hvid eller gul stribe på neglens ene side.
- Hyperkeratose. Under neglen liggende lag, som kan skrælles af.
- Distal onykolyse. Neglens ende kommer op. Den frie kant smuldrer ofte.
- Hvid neglesvamp på overfladen. Skælagtige hvide stumper og fordybninger på neglepladens top.
- Proksimal neglesvamp. Hvide pletter dukker op i lunulaen.
- Fuldstændig ødelæggelse af neglen.

HOW DOES IT WORK?

Dette FungiCheck-testkit indeholder 10 fuldstændige tests. Med 10 teststrimler, ekstraktionsvæske, 10 testrør og 10 rørepinde.

Undersøgelsen skal altid gennemføres af en professionel med noget erfaring i at gennemføre sterile tests. Denne test er meget nemt at anvende. Med blot 1 mg negleprøve og 10 minutter af din tid kan du allerede se resultatet på teststrimlen.

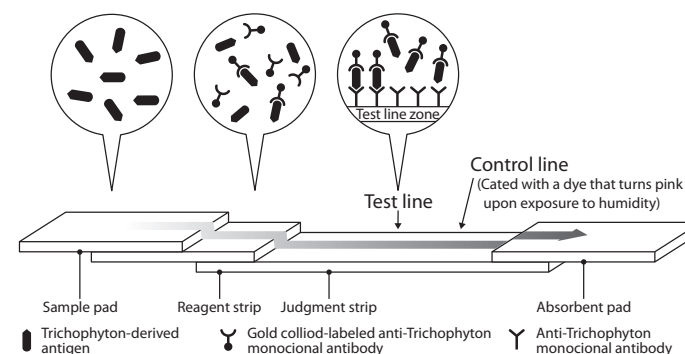

Denne teststrimmel i FungiCheck-kittet består af et prøvelag, en reagensstrimmel, en resultatstrimmel og et absorberende lag. Den ekstra kontrollinje sikrer, at din prøve er blevet optaget rigtigt af teststrimlen.

