

DERMATOPHYTE PROFESSIONAL TEST STRIP

TEST OM PASIENTENE DINE HAR TINEA UNGUIUM I DIN EGEN KLINIKK



SPARER DEG FOR DYRE KURS



TAR BARE 10 MINUTTER



SPARER PENDER PÅ HVER ENESTE TEST



KOMPATIBEL MED SOPPDREPENDE MIDLER

ER DU INTERESSERT? IKKE VENT MED Å KONTAKTE OSS.

WWW.HFLLABORATORIES.COM | WWW.FUNGICHECK.COM

HFL LABORATORIES BV | DE HOOFT 59 | 5175 AX LOON OP ZAND | NL
T. +31 (0)13 4551749 | INFO@HFLLABORATORIES.COM

EN REVOLUSJONERENDE INNOVASJON

Dermatophyte Test Strip

FungiCheck Tinea Unguim



DERMATOPHYTE PROFESSIONAL TEST STRIP

TEST OM PASIENTENE DINE HAR TINEA UNGUIUM I DIN EGEN KLINIKK

HFL LABORATORIES | ESTABLISHED IN THE NETHERLANDS SINCE 2005

EN REVOLUSJONERENDE INNOVASJON

FungiCheck er et immunokromatografisk sett for profesjonelle for å oppdage dermatofytter i en negleprøve.

Dermatofytter er sopp som trenger keratin for å vokse. Disse soppene kan forårsake infeksjoner i hud, hår og negler. Fordi dermatofytter trenger keratin for å vokse, forekommer de bare i hår, negler og overflatehud. Dermatofytosis (soppinfeksjon) kalles også tinea-infeksjoner.

FungiCheck-teststrimmelen tester kun forekomst av tinea unguium (onychomycose) i neglene. (med unntak av candida og gjærsopper)


Eksempler på tinea unguium-uttrykk:

- Lateral onychomycose. En hvit eller gul stripe på en side av neglen.
- Hyperkeratose. Avtrekkbare lag under neglen.
- Distal onycholysis. Enden av neglen kommer opp. Den frie kanten begynner ofte å smuldre.
- Overfladisk hvit onychomycose. Flakvise hvite flekker og groper i toppen av negleplaten.
- Proksimal onychomycose. Gule flekker vises i lunula.
- Fullstendig ødeleggelse av neglen.

HOW DOES IT WORK?

FungiCheck-testsettet inneholder 10 komplette tester. Inkludert 10 teststrimler, ekstraksjonsvæske, 10 prøverør og 10 rørepinner.

Testen må alltid gjennomføres av en profesjonell helsearbeider med en viss erfaring med steril testing. Testen er meget enkel å bruke. Du trenger bare en negleprøve på 1 mg og 10 minutters tid, så kan du allerede lese av resultatet på teststrimmelen.

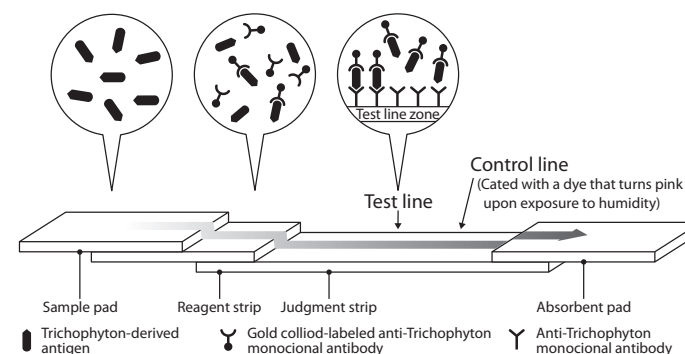

Teststrimmelen i FungiCheck-settet består av et prøvelag, en reagensstrimmel, en resultatstrimmel og en absorberende pute. Den ekstra kontrollinjen sikrer at prøven er ordentlig absorbert av teststrimmelen.

